

見守りシステム

Patient Watcher®



ペイシェントウォッチャー プラス

操作マニュアル(簡易版)



Advanced and lasting company
that is exquisite in every respect

ALCOLEX

Ethical Solution Company



画面の種類 (1 / 3)

PW (ペイシェントウォッチャー)の画面には以下の3つの種類の画面があり、それぞれに操作権限を設定することができます。

(1) 管理画面

すべての設定や閲覧ができる画面です。

施設ID

ユーザID

パスワード

ログイン

■SSL対応 入力された情報は暗号化して送信されます。

管理者画面 (システム管理者の方や設定の編集権限のある方にのみ表示)	
ログインURL	
施設ID	
ログインID	
ログインパスワード	

管理画面

Patient Watcher
© 2016 ALCO-EX Inc.

アルコールホーム
全表示

管理者

諭吉さん

邦子さん

停止中
電源が入っていません。

通知はありません

ON



画面の種類 (2 / 3)

(2) モニタ画面

管理画面から許可を得た設定のみができます。主に見るためだけの用途に使うことを想定した画面です。

The login form on the left has three input fields: 施設ID (Facility ID), ユーザID (User ID), and パスワード (Password). Below these is a button labeled ログイン (Login). A red box highlights the ログイン button. A red arrow points from the ログイン button to the main monitor screen below.

The table on the right shows the mapping between the form fields and the table rows:

モニタ画面（閲覧のみご利用頂くサイト）	
ログイン画面URL	
施設ID	
ログインID	
ログインパスワード	

モニタ画面

The monitor screen displays the Patient Watcher interface. At the top, it shows the title "Patient Watcher" and "アルコホーム 全表示". A red banner at the top indicates a completed update operation. Below the banner, there is a section for "重点監視対象パネルのタブをドロップして追加してください". The main area shows two patient panels: "諭吉さん" (Yukiji) and "邦子さん" (Kuniko). The "諭吉さん" panel shows a video feed of a patient in a bed. The "邦子さん" panel shows a power status alert: "停止中 電源が入っていません。" (Stopped, power is not on). On the right side, there is a notification for "15:35 生体反応異常 諭吉さん" (15:35 Vital reaction abnormality Yukiji) with a "対応" (Response) button. At the bottom right, there is a speaker icon with "ON" text.



画面の種類 (3 / 3)

(3) アプリ画面

スマホやタブレットで見るアプリ (モバイルPW)画面です。

※ アプリのダウンロードは別紙「モバイルPWの操作マニュアル」を参照して下さい。

The login screen for Patient Watcher. It features a header with the logo. Below it are three input fields: '施設ID' (Facility ID), 'ユーザID' (User ID), and 'パスワード' (Password). A red box highlights the 'ログイン' (Login) button. Below the button, a message states: '■SSIDと入力された情報は暗号化して送信されます。' (The SSID and entered information are encrypted and transmitted).

◆専用アプリ (閲覧のみご利用頂く無料アプリ)	
アプリ名	モバイルPW
施設ID	
ログインID	
パスワード	

モバイルPW画面

The home screen of the Mobile PW app in list view. It shows a header with a menu icon and '全表示' (All). Below is a list of users: '諭吉さん' (25分前), '英世さん' (10分前), and '一葉さん' (11分前). The first item is highlighted with a red box. At the bottom is a navigation bar with icons for notifications, users, and a bed.


The home screen of the Mobile PW app in video view. It shows a header with a menu icon and '全表示' (All). Below is a video player showing a patient in a bed. The video title is '諭吉さん'. Below the video are controls for volume, play/pause, and a checkmark. At the bottom is a navigation bar with icons for notifications, users, and a bed.

ログイン後、最初からは「新着画面」が表示されます。その利用者様をタップすると「利用者パネル (映像)画面」に表示されます。



入居様追加とPWの割り当て (1 / 4)


メニューから「利用者管理」をクリックします。

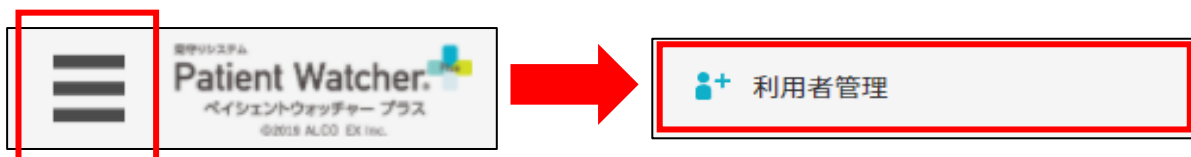

「氏名順」か「未割当順」をタップすると利用者様の情報を並び替えることができます。また、絞り込み欄を検索すると絞り込むことができます。

(1) 利用者様の新規作成

PWで見守りたい利用者様の情報を追加登録します。

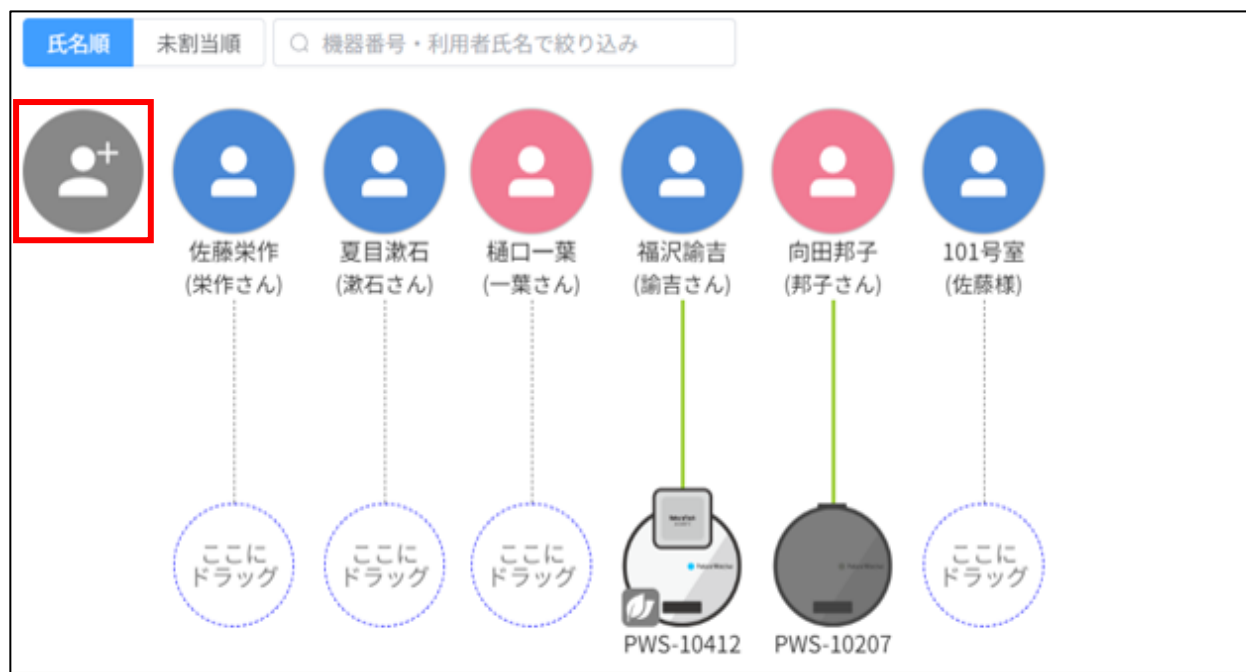

① 「」をクリックします。




入居様への追加とPWの割り当て (2 / 4)

- ② 利用者様情報を入力します。
赤枠内の項目を入力します。
*マークは入力必須項目です。

※ ③～④は必須ではありません。

- ③ 入居様様のマークに画像を付けることができます。
「画像を選択」をクリックするとフォルダーが表示されるのでフォルダーとフォルダー内にある登録したい画像を探します。

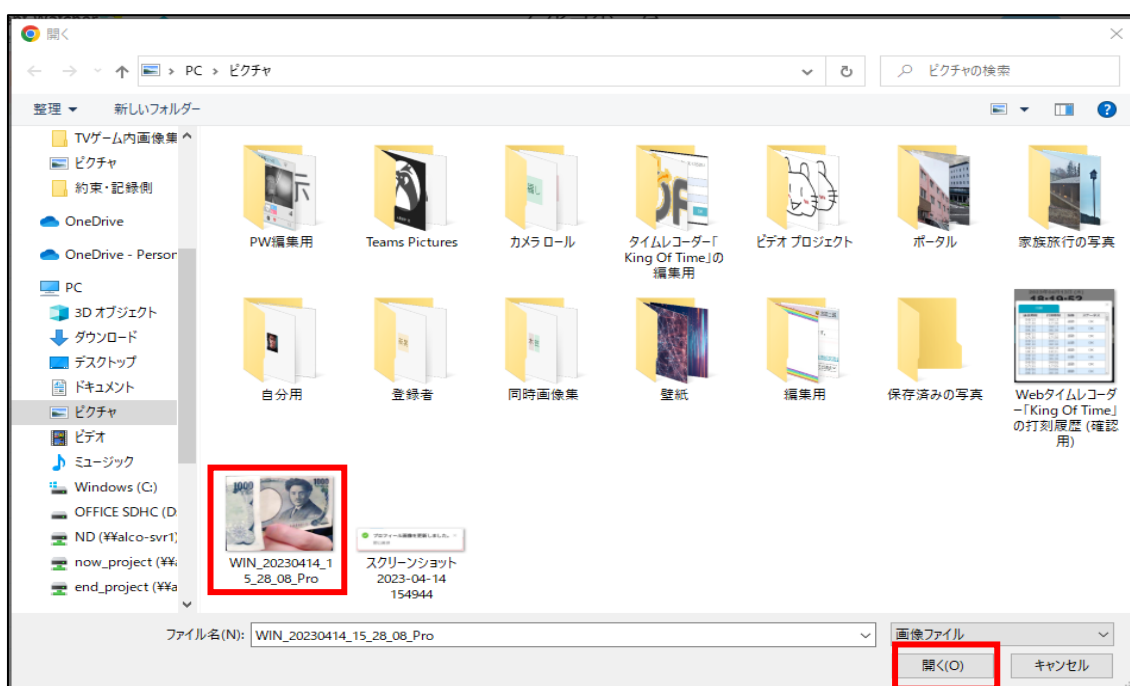


- ④ 登録したい画像をクリックして「開く」をクリックします。



入居者様の追加とPWの割り当て (3 / 4)



- ⑤ 選択した画像の表示範囲を調整します。入力と調整が終わったら「登録」をクリックして切り取ります。「取り消し」をクリックすると選択した画像は無効になります。

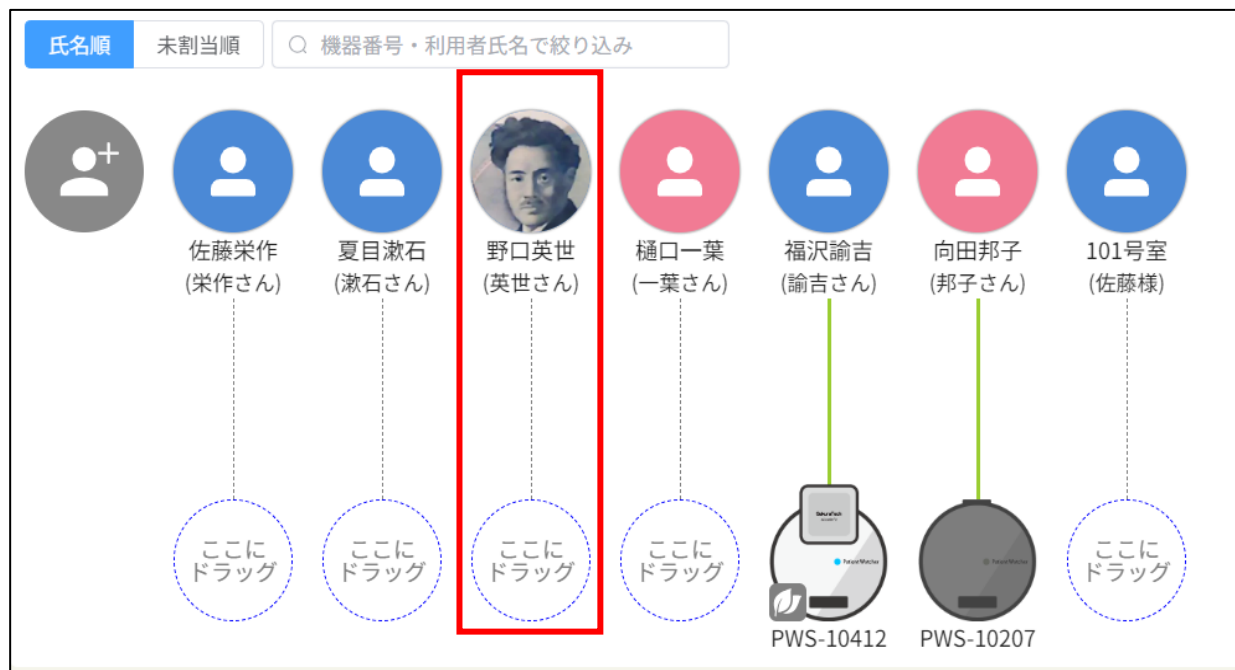

- ⑥ 利用者情報の登録が完了すると、登録した利用者様が追加されます。




入居様への追加とPWの割り当て (4 / 4)

物理的な設置や移動と同時に論理的なPWの割り当てを行うことで
検出した情報を利用者様に紐付けすることができます。

(2) PWを割り当てる


- ① PWを利用者様に割り当てるときはPWマークをドラッグアンドドロップして割り当てます。

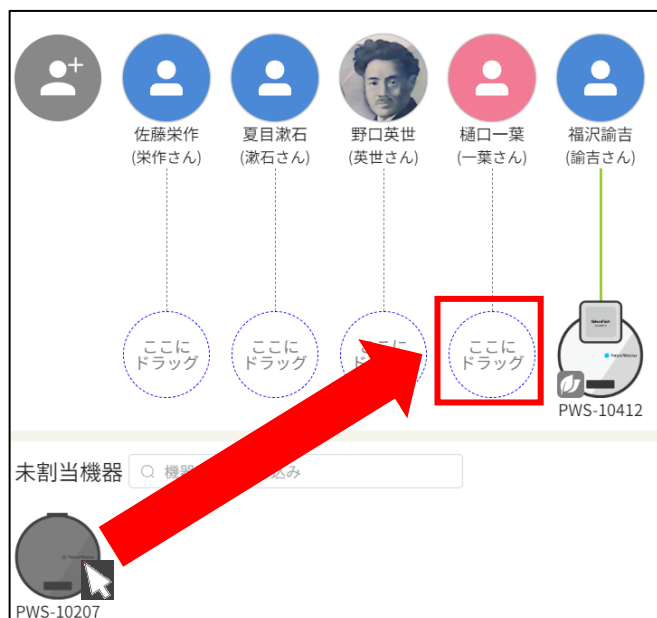

- ② ドラッグし終わったら「保存」をクリックします。

(3) PWを取り外す

- ① PWを利用者様から取外すときはPWマークをドラッグアンドドロップして解除します。

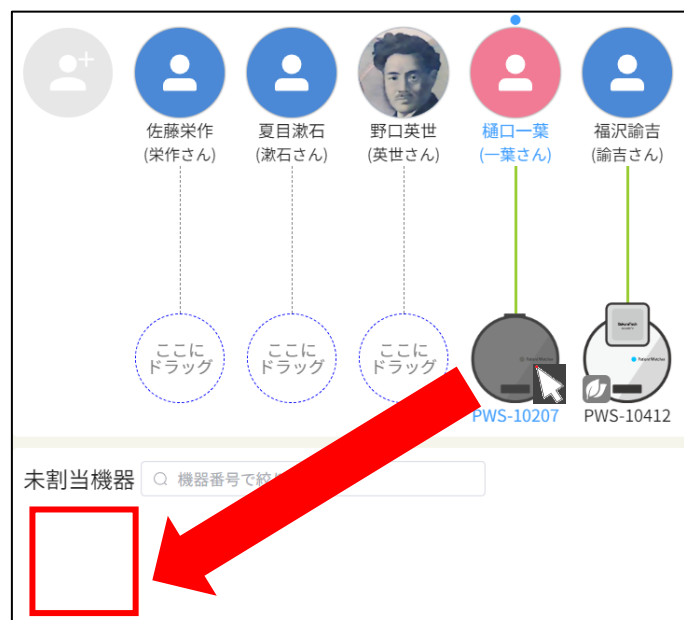

- ② ドラッグし終わったら「保存」をクリックします。




プッシュ通知 (1 / 4)

スマホのプッシュ通知

通知が許可されていれば、プッシュ通知はモバイルPWの画面が開いていても、閉じていても、お知らせが発生したことを通知します。

(1) 画面が開いているとき

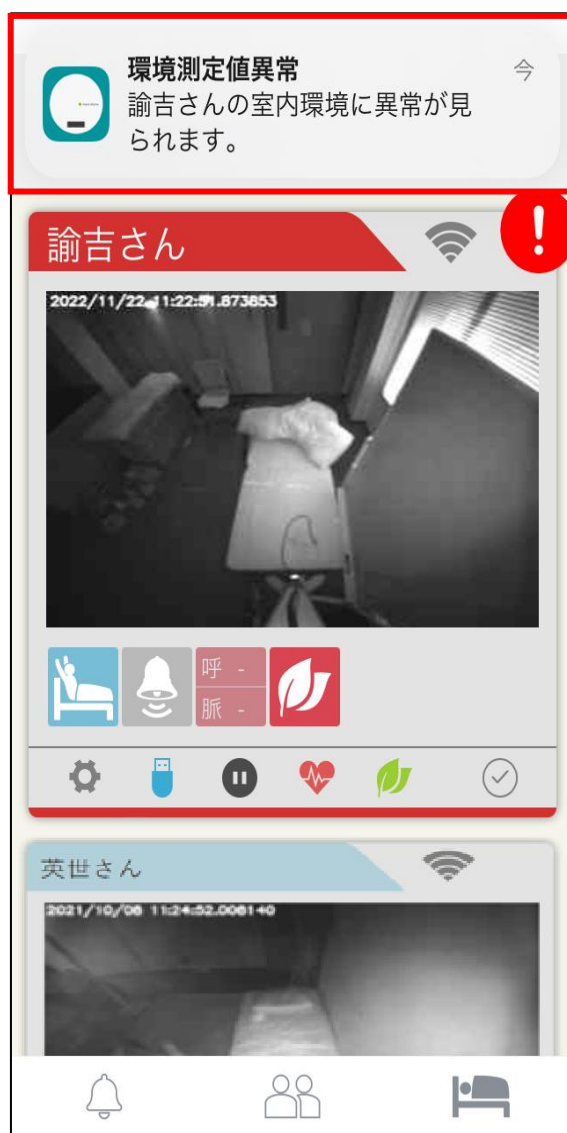


画面が開いていても、お知らせ通知が発生するとプッシュ通知が届きます。 プッシュ通知をタップするとモバイルPWが起動されます。



プッシュ通知 (2 / 4)

(2) 画面が閉じているとき

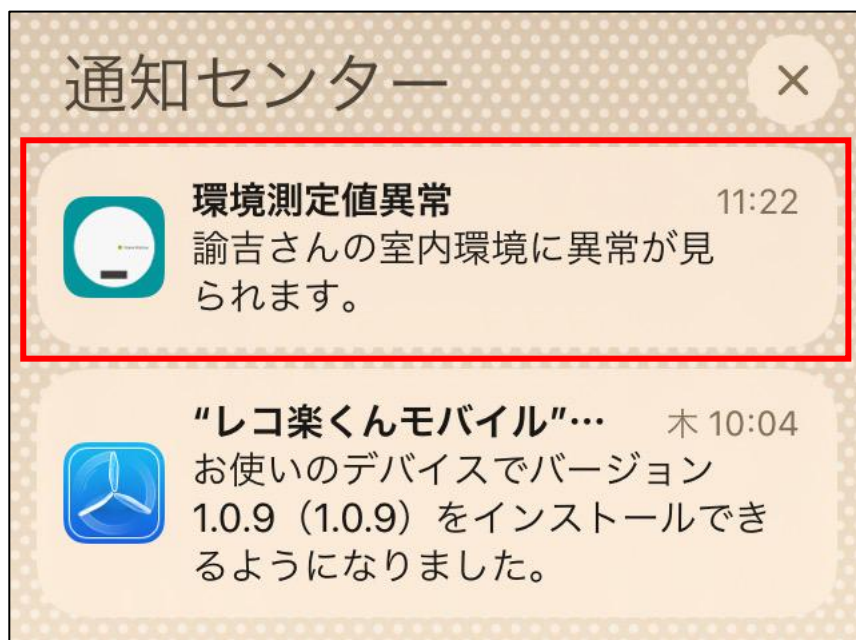

画面が閉じているときは、お知らせが発生するとプッシュ通知が届きます。 プッシュ通知をタップするとモバイルPWが起動されます。

※ スマホのプッシュ通知は「設定」の「通知」で「モバイルPW」の通知がチェックしているかどうか、確認して下さい。




プッシュ通知 (3 / 4)

タブレットのプッシュ通知

通知が許可されていれば、プッシュ通知はモバイルPWの画面が開いていても、閉じていても、お知らせが発生したことを通知します。

(1) 画面が開いているとき -

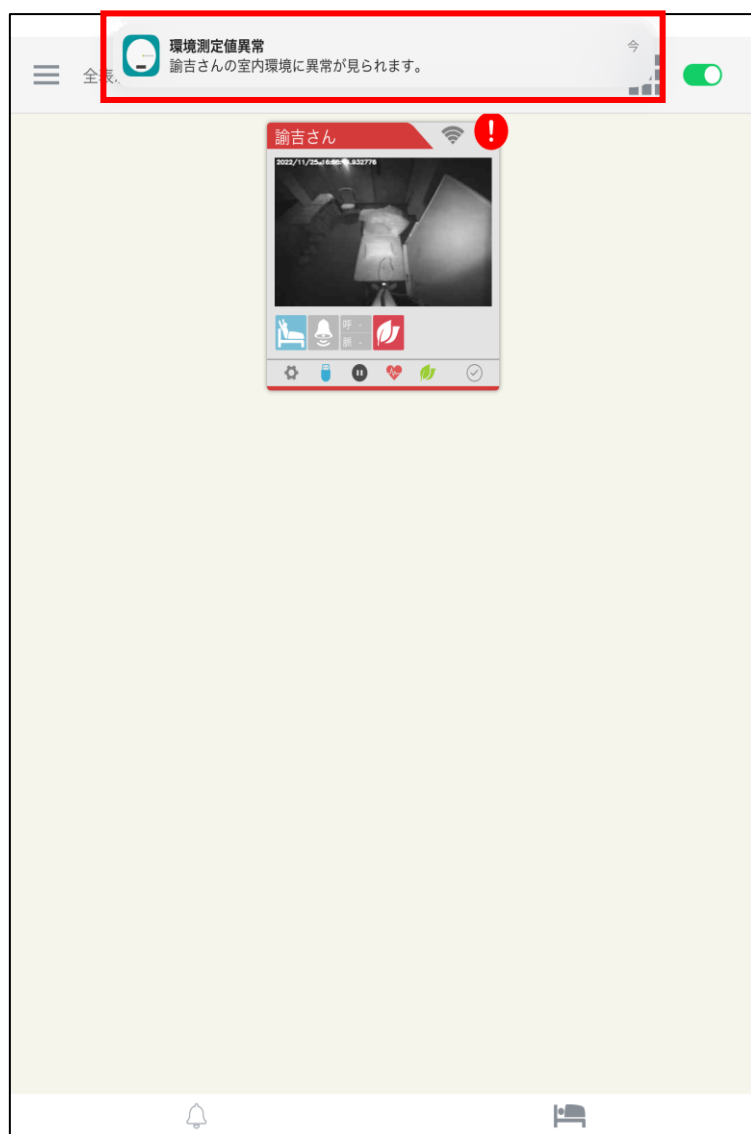

画面が開いていても、お知らせ通知が発生するとプッシュ通知が届きます。 プッシュ通知をタップするとモバイルPWが起動されます。



注意事項

- (1) 通知が設定されていればモバイルPWにログインすると、プッシュ通知が届きます。
- (2) ログアウトすると、プッシュ通知は届かなくなります。
- (3) プッシュ通知を止めるにはモバイルPWでログアウトを行うか、スマホの通知設定画面でモバイルPWの通知をオフにします。
- (4) モバイルPWをログアウトせずに止めた場合、プッシュ通知は引き続き届きます。
- (5) その他、モバイルPWの動作に異常があるときは、一度ログアウトして再ログインして下さい。それでも異常な場合はモバイル機器の電源を切って再起動して下さい。
- (6) プッシュ通知の設定をしても一部のAndroid端末では通知が届かないものがあります。お求めになった販売店にお問い合わせ下さい。
- (7) メンテナンス中のアプリはご利用できません。



お問い合わせ先

PW (ペイシェントウォッチャー)へのお問い合わせは、下記コールセンターにて受け付けております。

コールセンター連絡先

電話番号

0120-165-915

受付時間

平日 9:00 ~ 17:00

